



Christiane Gambin
cgambin@asstsas.qc.ca

L'ASSTSAS présente de nouveaux équipements susceptibles d'améliorer la SST, mais ne formule aucune recommandation d'achat. Faites-en l'essai et évaluez-les en fonction de vos besoins.

Relever un client semi-autonome étendu au sol

Un client fait une chute et ne peut se relever seul. Voilà une tâche qui semble difficile !

Les intervenants travaillent alors dans des postures contraignantes et risquent de se blesser. *Raizer*, un nouvel équipement compact, facilite maintenant le travail. D'origine scandinave, cette chaise élévatrice ne requiert aucune force physique lors de l'utilisation. De plus le levage se fait lentement et le client se sent en sécurité.

Cet équipement est composé de cinq pièces qui s'assemblent en trois minutes autour du client allongé au sol. La chaise commence son ascension et redresse le client en l'assoissant progressivement. Elle s'avère aussi utile avec une clientèle pédiatrique pour qui les transferts au sol sont fréquents. ■

POUR EN SAVOIR PLUS

Capacité : 150 kg max. / Poids : 13 kg
Coût : env. 5500 \$
Garantie : un an
Télécommande sans fil en option

Distributeur : Denis Joanisse, président, Rossbro Engineering
6, rue Ader, bureau 201, Lachute (Québec) J8H 3R8
Tél. : 450 562-4411, 1 800 678-5884, 514 917-1726 (cell.)
dj@rossbro.com - www.rossbro.com

Étapes d'utilisation

1. PROCÉDER À L'ÉVALUATION CLINIQUE POUR S'ASSURER QUE LE CLIENT N'EST PAS BLESSÉ.
2. METTRE UN OREILLER SOUS SA TÊTE.
3. LUI FLÉCHIR LES GENOUX ET PLACER LE BLOC-MOTEUR EN-DESSOUS.
4. INSTALLER LA SANGLE AU NIVEAU DES HANCHES, SANS TROP LA SERRER.
5. PASSER LES DEUX PARTIES DU DOSSIER SOUS LE TRONC DU CLIENT ET ENTRER LES FIXATIONS DANS L'ASSISE. UN CLIC CONFIRME QU'ELLES SONT BIEN FIXÉES.
6. INSTALLER LES PATTES DE L'ÉQUIPEMENT ET LES FIXER À L'ASSISE.
7. ACTIONNER LA COMMANDE ET DÉBUTER LA LEVÉE TOUT EN MAINTENANT LE COU DU CLIENT.
8. POURSUIVRE JUSQU'À CE QUE LE CLIENT SE RETROUVE ASSIS.
9. AU BESOIN, AUGMENTER LA HAUTEUR DE LEVÉE POUR AIDER LE CLIENT.

